



Pour un nettoyage chez vous, vous aurez besoin de :

- Une petite brosse ;
- Un spray de nettoyage ;
- Des lingettes ;
- Un gobelet de séchage et des capsules.

Enlevez le cérumen de l'embout.

Vaporisez le liquide de nettoyage et nettoyez doucement.

Retirez le panier interne du gobelet, placez la capsule dans le fond. Remettez le panier.

Posez votre aide auditive éteinte à l'intérieur.

Vissez le couvercle et laissez reposer toute la nuit.

Le matin, c'est sec et prêt à l'emploi. Fermez le couvercle pour préserver la capsule de séchage.

Remplacez la capsule une fois qu'elle a perdu sa couleur.