



La PerfectDry Lux est un boîtier électronique de déshumidification et désinfection conçu pour éliminer l'humidité de vos aides auditives.

Branchez la PerfectDry et ouvrez le couvercle.

Placez votre aide auditive à l'intérieur et fermez le couvercle.

Appuyez sur le bouton pour sélectionner le cycle désiré.

Appuyez une fois pour le cycle standard de 45 minutes.

Appuyez deux fois pour le cycle d'entretien intensif de 90 minutes.

Une fois le cycle terminé, le voyant s'éteint et vous pouvez ouvrir le couvercle et retirer les aides auditives.

Elles sont maintenant prêtes à être utilisées.

Vérifiez auprès de votre audioprothésiste si la PerfectDry Lux est compatible avec vos aides auditives.