

Collega l'alimentatore a una presa di corrente e inserisci il cavo di ricarica nel caricabatterie.

Posiziona gli apparecchi acustici Amplifon negli appositi slot di ricarica: quello destro nello slot contrassegnato dal punto rosso e quello sinistro nello slot contrassegnato dal punto blu.

Durante la ricarica, i LED indicano lo stato della batteria di entrambi i dispositivi: lampeggeranno lentamente durante la ricarica e rimarranno accesi in modo fisso quando gli apparecchi saranno completamente carichi.

Le luci LED sul retro del caricabatterie indicano lo stato della batteria della custodia di ricarica portatile.

Sono sufficienti 3 ore per una ricarica completa, che garantisce fino a 30 ore di autonomia.

