

Per la pulizia di routine avrai bisogno di:

- Spazzolino;
- Salviette o spray detergente;
- Bicchiere per capsule deumidificanti e capsule deumidificanti.

Pulisci delicatamente l'apparecchio acustico utilizzando lo spazzolino.

Spruzza il liquido detergente su un fazzoletto e passalo sull'apparecchio.

Rimuovi il cestino interno dal bicchiere per capsule deumidificanti.

Posiziona la capsula deumidificante sul fondo del bicchiere, con la parte bianca rivolta verso l'alto.

Riposiziona il cestino.

Inserisci l'apparecchio acustico spento e con il vano batterie aperto.

Chiudi il coperchio e lascia il dispositivo all'interno per tutta la notte.

Al mattino, l'apparecchio sarà asciutto.

Dopo aver rimosso l'apparecchio, richiudi il coperchio per preservare la capsula deumidificante.

Ricorda di sostituire la capsula deumidificante circa una volta al mese.

Per sapere come utilizzare al meglio i prodotti di pulizia, chiedi consiglio al tuo audioprotesista.

